



Snelstartgids



DE GETOONDE AFBEELDINGEN DIENEN ALLEEN TER ILLUSTRATIE

1

Download de FOBO Wheely-app op uw
smartphone vanuit Google Play Store
(voor Android) of App Store (voor iOS)



Download on the
App Store




GET IT ON

Google Play

2

Zorg ervoor dat Bluetooth, locatieservices en de internetverbinding op uw smartphone zijn ingeschakeld.

Open de FOBOWheely-app en log in/
registreer u met uw persoonlijke e-mailadres
of log in met uw Facebook-, Google- of
Apple-account.

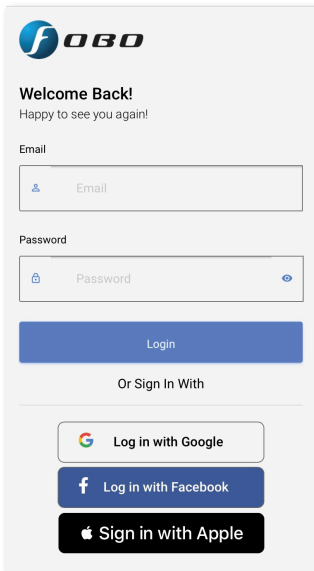

The screenshot shows the login interface of the FOBOWheely app. At the top is the app's logo, which consists of a blue circle with a white 'f' and the word 'OBO' in a bold, black, sans-serif font. Below the logo, the text 'Welcome Back!' is displayed in a bold, black font, followed by 'Happy to see you again!' in a smaller, regular black font. There are two input fields: one for 'Email' with a person icon on the left, and one for 'Password' with a lock icon on the left and an eye icon on the right to toggle visibility. Below these fields is a large blue button labeled 'Login'. Underneath the button is the text 'Or Sign In With'. At the bottom, there are three social login buttons: 'Log in with Google' (with the Google logo), 'Log in with Facebook' (with the Facebook 'f' logo), and 'Sign in with Apple' (with the Apple logo).

f OBO

Welcome Back!
Happy to see you again!

Email

Email

Password

Password

Login

Or Sign In With

 Log in with Google

 Log in with Facebook


 Sign in with Apple

4

Geef toestemming voor alle machtigingen wanneer daarom wordt gevraagd door de app.

5

Druk op de plusknop "+" op de startpagina van de FOBO Wheely Startpagina van de app om de installatie voor een nieuwe rolstoel te starten.

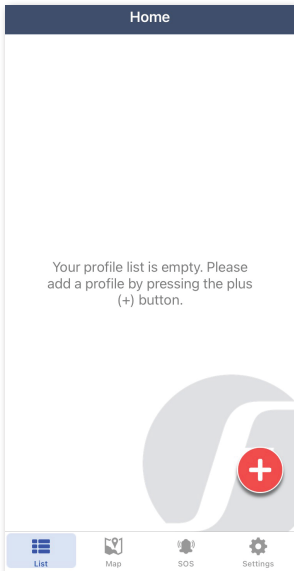

6

Selecteer het rolstoelprofiel, voer de andere gegevens in en druk op het pictogram Opslaan  om de profielinstellingen op te slaan.

 Add WheelChair 


Wheelchair 1


Wheelchair 2


Wheelchair



Vehicle Recommended Pressure

Position	Min	Rec	Max
Left Tire (LT)	180	200	250
Right Tire (RT)	180	200	250

Alert at Zero Pressure 








7

Schroef de sensorafdekking los om het batterijlipje te verwijderen.
Schroef vervolgens de sensorafdekking weer vast en controleer of deze goed vastzit.




Schroef de sensorafdekking los

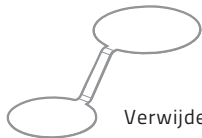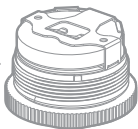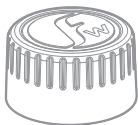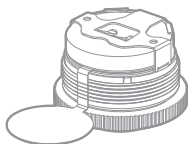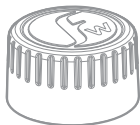

Verwijder het batterijlipje.

8

Volg de instructies op het scherm en installeer de sensoren op de juiste manier op de bandventielen.

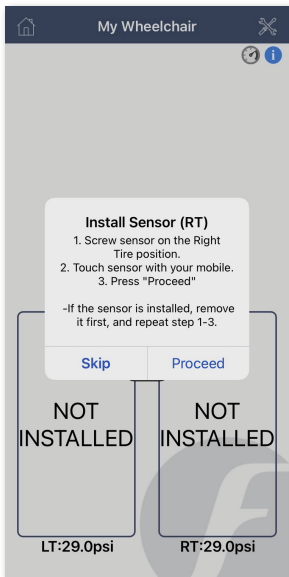

Om een FOB0-slotmoer te installeren:



OPTIONEEL VOOR EXTRA VEILIGHEID

1. Schroef de FOB0-slotmoer op de bandventiel met de 'bult' naar binnen gericht tot het einde van de ventielschroefdraad.
2. Schroef de FOB0 Wheely-sensor stevig vast op het ventiel van de band.
3. Draai de FOB0-slotmoer tegen de klok in alsof u deze wilt verwijderen, totdat deze de FOB0 Wheely-sensor raakt.
4. Houd de FOB0 Wheely-sensor voorzichtig vast en gebruik de meegeleverde sleutel om de FOB0-slotmoer verder vast te draaien tegen de FOB0-sensor. Dit is om te voorkomen dat het rubberen ventiel verdraait.

Opmerking: Draai de borgmoer voorzichtig tegen de sensor aan; er is geen overmatige kracht nodig.

Om de FOB0 Wheely-sensor te ontkoppelen van uw smartphone:

1. Open het gewenste profiel en druk lang op de bandpositie die u wilt loskoppelen.
2. Er verschijnt een dialoogvenster, druk op de optie Sensor loskoppelen.
3. Voer dezelfde stappen (1-2) uit om de andere sensoren van uw account los te koppelen.

Opmerking: Zorg ervoor dat u een goede internetverbinding hebt tijdens het loskoppelen.

Scan hier om te controleren wat er in de doos zit.





Download de volledige gebruikershandleiding van
www.my-fobo.com